

Xailin Night



**Pommade ophtalmique
lubrifiante 5g**

SANS CONSERVATEUR

FR Mode d'emploi

Il est important de lire attentivement la présente notice avant d'utiliser la pommade ophtalmique lubrifiante Xailin Night. Les informations fournies présentent les caractéristiques importantes du produit. Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Qu'est-ce que la pommade ophtalmique lubrifiante Xailin Night ?
La pommade ophtalmique lubrifiante Xailin Night est une pommade blanche translucide et non granuleuse, sans conservateur, pour le soulagement nocturne des sensations de sécheresse oculaire. Le tube contient 5 g de pommade stérile.

Composition :

La pommade ophtalmique lubrifiante Xailin Night contient de la vaseline blanche 57,3% p/p, de l'huile de paraffine 42,5% p/p et des alcools de lanoline 0,2% p/p, qui produisent un film transparent, lubrifiant et retenant l'humidité à la surface de l'œil.

Quand utiliser la pommade ophtalmique lubrifiante Xailin Night ?
La pommade ophtalmique lubrifiante Xailin Night apporte un soulagement nocturne des sensations de sécheresse oculaire, puisqu'elle agit comme une barrière contre la perte d'humidité. Idéale pour une utilisation au moment du coucher.

La pommade ophtalmique lubrifiante Xailin Night soulage les symptômes de sécheresse oculaire, telles que la douleur, l'irritation ou la sensation de corps étrangers. Les symptômes de sécheresse oculaire surviennent à la suite de troubles de la surface oculaire, qui peuvent être provoqués par un certain nombre de raisons différentes lorsque les larmes normales sont soit de mauvaise qualité soit produites en quantité insuffisante pour garder l'œil suffisamment hydraté.

Il n'y a pas de limite d'âge d'utilisation pour la pommade ophtalmique lubrifiante Xailin Night.

La pommade ophtalmique lubrifiante Xailin Night peut être utilisée pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment utiliser la pommade ophtalmique lubrifiante Xailin Night ?
Appliquez un ruban de pommade d'environ 1 cm dans chaque œil au besoin, en suivant les instructions ci-après :

Avant d'ouvrir un nouveau tube de pommade ophtalmique lubrifiante Xailin Night, veuillez vérifier que la bague d'inviolabilité sur le bouchon du tube est intacte.

1. Tourner le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de rompre la bague d'inviolabilité
2. Lavez et séchez-vous soigneusement les mains avant utilisation
3. Retirez le bouchon extérieur
4. Si vous portez des lentilles de contact, retirez vos lentilles
5. Penchez la tête en arrière et regardez vers le haut
6. Tirez doucement la paupière inférieure vers le bas pour dégager un petit espace entre l'œil et la paupière
7. Tenez le tube entre le pouce et le majeur de l'autre main, portez le tube à la verticale, au-dessus de l'œil, et essayez de ne pas toucher l'œil avec l'embout
8. Appliquez une pression suffisante sur le tube pour libérer un ruban de pommade d'environ 1 centimètre ou selon les instructions de votre médecin ou de votre pharmacien
9. Clignez des yeux plusieurs fois

10. Si vous n'avez pas atteint l'œil, appliquez un second ruban de pommade
11. Essayez soigneusement tout excès de Xailin Night autour de la paupière avec un mouchoir

12. Répétez l'opération pour l'autre œil, le cas échéant

13. Revissez le bouchon extérieur sur le tube, en essayant de ne pas toucher l'embout de l'applicateur avec quoi que ce soit, y compris l'œil ou les doigts

14. Attendez au moins 30 minutes avant de vous administrer tout autre médicament ophtalmique

Si vous avez des doutes concernant l'utilisation de la pommade ophtalmique lubrifiante Xailin Night ou si vos problèmes oculaires persistent, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Précautions et avertissements :

- Ne pas utiliser si la bague d'inviolabilité sur le bouchon du tube n'est pas intacte
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique aux alcools de lanoline ou à l'un des ingrédients
- Ne pas utiliser avec des lentilles de contact
- Ne partager la pommade ophtalmique lubrifiante Xailin Night avec aucune autre personne
- La pommade ophtalmique lubrifiante Xailin Night peut provoquer une légère sensation de brûlure passagère et/ou un trouble visuel bref après son application. Attendre que la vision normale soit rétablie avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage ou imprimée sur la bague de serrissage du tube
- Conserver entre +1°C et +25°C
- Jeter le contenu 28 jours après la première ouverture
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants
- Usage oculaire externe, ne pas avaler
- Jeter le tube utilisé conformément à la réglementation locale d'élimination des déchets

nicox Distribué par Nicox Pharma, CS10313, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, France - nicoxpharma@nicox.com

Medicom Healthcare Ltd., 235 Hunts Pond Road, Fareham, Hampshire, PO14 4PJ, Royaume-Uni



Conservateur +1°C et +25°C



Attention: voir le mode d'emploi



Jeter le contenu 28 jours après la première ouverture



Consulter le mode d'emploi

STERILE

A

Stérilisé avec des techniques aseptisées

Xailin est une marque de Nicox

Dernière révision de la notice : octobre 2013

CE 0120