

Xailin | 
HA | Hyaluronate de sodium
Collyre 0,2 % p/v 10 ml
SANS CONSERVATEUR DANS L'ŒIL

FR Mode d'emploi

Il est important de lire ce document attentivement avant d'utiliser le collyre Xailin HA. Les informations qu'il contient résument les caractéristiques essentielles du produit. Si vous avez d'autres questions, renseignez-vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

Qu'est-ce que Xailin HA ?

Xailin HA est un collyre lubrifiant multi-doses pour soulager les symptômes de sensations de sécheresse oculaire modérée à sévère. Le flacon contient 10 ml de collyre isotonique stérile.

Composition :

Xailin HA collyre contient du hyaluronate de sodium à 0,2 % p/v et du borborate de sodium dans une solution aqueuse tamponnée. Xailin HA contient une fraction spécifique hautement purifiée de hyaluronate de sodium (sel sodique de l'acide hyaluronique) produit par fermentation bactérienne et est par conséquent exempt de protéines animales. L'acide hyaluronique est un polysaccharide biocompatible, d'origine naturelle, offrant des propriétés viscoélastiques et hygroscopiques uniques. Dans l'œil humain, l'acide hyaluronique se trouve dans le vitré, les glandes lacrymales, l'épithélium cornéen, la conjonctive et les larmes. L'acide hyaluronique possède des propriétés muco-adhésives ainsi que la capacité à piéger l'eau ; il est connu pour influencer la répartition de l'eau dans le stroma cornéen. Ceci, combiné aux propriétés couvrantes de l'acide hyaluronique, entraîne une augmentation de la durée de contact pré-cornéen et du temps de rupture du film lacrymal, résultant donc en une lubrification de plus longue durée de la surface de la cornée. L'acide hyaluronique est ajouté aux produits destinés aux lentilles de contact pour améliorer l'humidification et le confort du port de celles-ci. Xailin HA contient un conservateur qui se transforme en eau et en oxygène au contact de l'œil, minimisant ainsi l'irritation qui peut être occasionnée par les conservateurs classiques, tout en offrant la commodité d'une présentation multi-doses. Vous ne sentez que l'effet de soulagement que vous procure le collyre.

Quand utiliser Xailin HA ?

Xailin HA est utilisé pour lubrifier et protéger l'œil dans certaines affections oculaires. Xailin HA apaise et soulage les symptômes de sensations de sécheresse oculaire, telles que la douleur, l'irritation ou la sensation de corps étrangers. Les symptômes de sécheresse oculaire surviennent à la suite de troubles de la surface oculaire, qui peuvent être provoqués par un certain nombre de raisons différentes lorsque les larmes normales sont soit de mauvaise qualité soit produites en quantité insuffisante pour garder l'œil suffisamment hydraté. Xailin HA peut être utilisé par les porteurs de lentilles de contact.

Comment utiliser Xailin HA ?

La dose habituelle est d'une à deux gouttes à instiller 2 à 4 fois par jour selon les besoins, ou selon les instructions de votre professionnel de santé, qui peut vous recommander d'utiliser ce produit d'une manière différente. Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez l'enfant.

Avant d'ouvrir un nouveau flacon de Xailin HA, veuillez vérifier que la bande de sécurité sur le bouchon du flacon est intacte.


1. Dévissez le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rompre le joint.
2. Lavez et séchez-vous soigneusement les mains avant utilisation.
3. Retirez le bouchon.

4. Penchez la tête en arrière et regardez vers le haut.
5. Tirez doucement la paupière inférieure vers le bas pour dégager un petit espace entre l'œil et la paupière.
6. Tenez le flacon entre le pouce et le majeur de l'autre main, et, avec l'index, appliquez une pression modérée à la base du flacon de collyre pour instiller une goutte de Xailin HA dans le petit espace dégagé.
7. Clignez des yeux plusieurs fois.
8. Si vous pensez que la goutte n'a pas atteint votre œil, instillez une seconde goutte.
9. Essuyez soigneusement tout excès de Xailin HA autour de la paupière avec un mouchoir.
10. Revissez le bouchon sur le flacon, en essayant de ne pas toucher quelque ce soit avec l'embout de l'application, y compris l'œil ou les doigts.
11. Lavez-vous soigneusement les mains après utilisation.
12. Attendez au moins 30 minutes avant de vous administrer tout autre médicament ophtalmique.

Si vous avez des doutes concernant l'utilisation de Xailin HA ou si vos problèmes oculaires persistent, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre opticien.

Précautions et avertissements :

- Ne pas utiliser si la bague de sécurité sur le bouchon du flacon n'est pas intacte.
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique au produit.
- Ne pas toucher l'œil ou toute surface avec l'extrémité du flacon.
- Ne partager Xailin HA avec aucune autre personne.
- Xailin HA peut provoquer une vision floue temporaire après l'application. Attendez que la vision normale soit rétablie avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage ou imprimée sur le flacon.
- Conserver entre +1 °C et +25 °C.
- Jeter le contenu 28 jours après la première ouverture.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Usage oculaire externe uniquement, ne pas avaler.
- Consulter un médecin ou un pharmacien avant d'utiliser Xailin HA en cas de grossesse ou d'allaitement.
- Jeter le flacon utilisé conformément à la réglementation locale d'élimination des déchets.

 Distribué par Nicox Pharma, CS 10313, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, France - nicoxpharma@nicox.com



Conserver entre +1 °C et +25 °C



Attention : voir le mode d'emploi



Jeter le contenu 28 jours après la première ouverture



Consulter le mode d'emploi



Stérilisé avec des techniques aseptisées



Xailin est une marque de Nicox. Dernière révision de la notice : Février 2014