

UNIMER®

BABY [NaCl 0.9%]

FR QU'EST CE QU'UNIMER BABY ?

UNIMER BABY est un sérum physiologique stérile, sans conservateur, non injectable. Présenté en unidose, UNIMER BABY est hygiénique, et permet facilité et sécurité d'emploi.

COMPOSITION :

Chlorure de sodium 0,9 g
Eau purifiée q.s.p. 100 ml

QUELLES SONT LES INDICATIONS D'UNIMER BABY ?

UNIMER BABY sérum physiologique est conseillé chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte :

- Pour l'hygiène nasale : en instillation ou en lavage pour les nez secs ou encombrés,
- Pour l'hygiène oculaire : en instillation, en lavage ou en bain,
- Pour le lavage des plaies.

COMMENT UTILISER UNIMER BABY ?

Ne pas utiliser la même unidose pour les différentes utilisations. A usage unique et individuel. Détacher une unidose et l'ouvrir en tournant la partie supérieure.

• POUR L'HYGIENE NASALE ET OCULAIRE

UNIMER BABY sérum physiologique peut être utilisé quotidiennement pour l'hygiène nasale et oculaire, à raison d'1 à 6 lavage(s) par jour, en fonction des besoins.

- Pour l'hygiène du nez

En instillation ou en lavage pour les nez secs ou encombrés.

Mode d'emploi:

Incliner la tête en arrière.
Introduire délicatement l'embout dans la narine et appuyer légèrement sur l'unidose.

Répéter l'opération pour l'autre narine.

Redresser la tête pour laisser s'écouler les mucosités, puis essuyer l'excédent.

Ne pas se moucher violemment au cours des 10 minutes suivant l'administration.

Précaution d'emploi:

Chez le nourrisson, instiller le produit avec le minimum de pression afin d'éviter tout risque de contamination de l'oreille moyenne.

- Pour l'hygiène des yeux

En instillation, en lavage ou en bains.

Mode d'emploi:

Déposer quelques gouttes de solution dans chaque œil, en prenant garde de ne pas mettre en contact l'unidose avec la surface de l'œil.

Essuyer l'excédent de liquide avec une compresse stérile.

Précaution d'emploi:

En cas de traitement par un collyre, attendre 15 minutes avant son instillation.

• POUR LE LAVAGE DES PLAIES

Mode d'emploi:

Rincer la plaie en utilisant la dose complète et en prenant garde de ne pas mettre en contact l'unidose avec la plaie.

Précaution d'emploi:

Essuyer l'excédent de liquide uniquement sur la peau saine.

COMMENT CONSERVER UNIMER BABY ?

Ne pas utiliser une unidose endommagée ou déjà ouverte au vu du risque de rapide contamination bactérienne. Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'unidose.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.