

Xailin

Hydrate



Xailin Hydrate Hypromellose
Collire 0,3 % p/v 10 ml

SANS CONSERVATEUR DANS L'ŒIL

FR Mode d'emploi

Il est important de lire attentivement la présente notice avant d'utiliser Xailin Hydrate collire. Les informations fournies présentent les points importants du produit. Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Qu'est-ce que Xailin Hydrate collire ?

Xailin Hydrate collire est un collire en flacon multidose destiné à soulager immédiatement les sensations de sécheresse oculaire. Le flacon contient 10 ml de collire stérile.

Composition :

Xailin Hydrate collire contient de l'hypromellose à 0,3 % p/v, du perborate de sodium et un tampon aqueux qs.

Xailin Hydrate contient un conservateur qui se transforme en eau et en oxygène au contact de l'œil, minimisant ainsi l'irritation qui peut être occasionnée par les conservateurs classiques, tout en offrant la commodité d'une présentation multidose. Vous ne sentez que l'effet de soulagement que vous procure le collire.

Quand utiliser Xailin Hydrate ?

Xailin Hydrate collire est utilisé pour lubrifier et protéger l'œil, et pour soulager immédiatement les sensations de sécheresse oculaire. Xailin Hydrate collire soulage les symptômes de sensations de sécheresse oculaire telles que la douleur, l'irritation ou la sensation de corps étrangers. Les symptômes de sécheresse oculaire surviennent à la suite de troubles de la surface oculaire, qui peuvent être provoqués par un certain nombre de raisons différentes lorsque les larmes normales sont soit de mauvaise qualité soit produites en quantité insuffisante pour garder l'œil suffisamment hydraté.

Xailin Hydrate peut être utilisé par les porteurs de lentilles de contact.

Comment utiliser Xailin Hydrate ?

La dose habituelle est de une à deux gouttes à instiller deux à quatre fois par jour au besoin, ou selon les instructions de votre professionnel de santé, qui peut vous recommander d'utiliser ce produit d'une manière différente. Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez l'enfant.

Avant d'ouvrir un nouveau flacon de Xailin Hydrate collire, veuillez vérifier que la bande de sécurité sur le bouchon du flacon est intacte.

1. Tournez le bouchon pour rompre la bague d'inviolabilité.
2. Lavez et séchez-vous soigneusement les mains avant utilisation.
3. Retirez le bouchon.
4. Penchez la tête en arrière et regardez vers le haut.
5. Tirez doucement la paupière inférieure vers le bas pour dégager un petit espace entre l'œil et la paupière.
6. Tenez le flacon entre le pouce et le majeur de l'autre main, et, avec l'index, appliquez une pression modérée à la base du flacon de collire pour instiller une goutte de Xailin Hydrate collire dans l'espace dégagé entre l'œil et la paupière.
7. Clignez des yeux plusieurs fois.
8. Si vous pensez que la goutte n'a pas atteint votre œil, instillez une seconde goutte.
9. Essayez soigneusement tout excès de Xailin Hydrate collire autour

de la paupière avec un mouchoir.

10. Répétez l'opération pour l'autre œil, le cas échéant.
11. Revisez le bouchon sur le flacon, en essayant de ne pas toucher quoique ce soit avec l'embout de l'appliqueur, y compris l'œil ou les doigts.
12. Lavez-vous soigneusement les mains après utilisation.
13. Attendez au moins 30 minutes avant l'administration de tout autre médicament ophtalmique.

Si vous avez des doutes concernant l'utilisation de Xailin Hydrate collire ou si vos problèmes oculaires persistent, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Précautions et avertissements :

- Ne pas utiliser si la bague de sécurité sur le bouchon du flacon n'est pas intacte.
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique au produit.
- Ne pas toucher l'œil ou toute surface avec l'extrémité du flacon.
- Ne partager Xailin Hydrate collire avec aucune autre personne.
- Xailin Hydrate collire peut provoquer un trouble de la vision après instillation. Attendez que la vision normale soit rétablie avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage ou imprimée sur le flacon.
- Conserver entre +1°C et +25°C.
- Jeter le contenu 28 jours après la première ouverture.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Usage oculaire externe uniquement, ne pas avaler.
- Consulter un médecin ou un pharmacien avant d'utiliser Xailin Hydrate collire en cas de grossesse ou d'allaitement.
- Jeter le flacon utilisé conformément à la réglementation locale d'élimination des déchets.

nicox Distribué par Nicox Pharma, CS10313, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, France - nicoxpharma@nicox.com

Medicom Healthcare Ltd., 235 Hunts Pond Road, Fareham, Hampshire, PO14 4PJ, Royaume-Uni



Conserver entre +1°C et +25°C



Attention : voir le mode d'emploi



Jeter le contenu 28 jours après la première ouverture



Consulter le mode d'emploi



Stérilisé avec des techniques aseptisées

Xailin est une marque de Nicox
Dernière révision de la notice : Juin 2014

CE 0120