



Dermatix® – Gel de silicone pour le traitement des cicatrices

Qu'est-ce que Dermatix gel?

Dermatix est un gel de silicone transparent à séchage rapide qui maintient l'équilibre de l'hydratation de la peau tout en aidant au traitement des surfaces cutanées cicatrisées après une intervention chirurgicale, une brûlure ou une blessure.

Il a été démontré que Dermatix aplanit, adoucit, atténue les cicatrices, diminue les démangeaisons et leurs désagréments et estompe la coloration des cicatrices.

Dermatix est facile à appliquer sur toutes les zones de la peau, y compris sur le visage, les articulations et les zones de flexion, et sèche rapidement pour former un film invisible.

Dermatix a été développé en utilisant la même chaîne de polymères simples que les plaques topiques de gel de silicone mais se présente lui, en tube. Il contient du polysiloxane.

Dermatix est conditionné sous forme de gel de silicone en tube de 15g et 60g.*

Dans quel cas est utilisé Dermatix gel?

Dermatix est utilisé pour le traitement et la prévention de cicatrices chéloïdes et de cicatrices hypertrophiques (résultant par exemple d'une intervention chirurgicale, d'une blessure ou d'une brûlure), lorsque la plaie est cicatrisée et que la surface cutanée est intacte.

Comment utiliser Dermatix gel?

Nettoyer la zone à traiter, puis séchez en tapotant. Appliquer une petite quantité de Dermatix sur la cicatrice en massant soigneusement. Afin de ne pas tacher vos vêtements, ôter l'excédent de Dermatix avec un mouchoir propre. Appliquer deux fois par jour matin et soir. Une fois sèche, la peau traitée par Dermatix peut être recouverte de produits cosmétiques.

Dermatix peut être utilisé par les enfants.

Quand Dermatix ne doit-il pas être utilisé?

- Dermatix ne doit pas être appliqué sur des blessures ouvertes ou récentes.
- Dermatix ne doit pas être appliqué sur les muqueuses ou à proximité des yeux.
- Dermatix ne doit pas être appliqué sur une peau traitée auparavant par des antibiotiques ou d'autres traitements et/ou produits

Dermatix doit être appliqué uniquement sur une peau propre et sèche.

Quels sont les effets indésirables éventuels de Dermatix gel?

Rarement, Dermatix gel peut entraîner des rougeurs, des douleurs ou une irritation de la peau. Si vous présentez l'un de ces effets indésirables ou tout autre effet non souhaité et gênant, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Comment conserver Dermatix gel?

- Tenir hors de la portée des enfants
- A conserver à l'abri de la chaleur
- A conserver à une température inférieure à 25°C
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte

Informations supplémentaires

Demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Fabriqué par:

Hanson Medical, Inc., Kingston, WA 98346, USA

Distributeur:

Valeant Pharmaceuticals International, Aliso Viejo, CA 92656, USA

Représentant dans l'UE:

Valeant Pharmaceuticals Ltd, Basingstoke, RG24 8WD, UK

Distributeur en Australia:

Valeant Pharmaceuticals Australia Pty. Ltd.
Level 1, 85 St. Hilliers Road, Auburn, NSW 2144
Tollfree 1 800 630 056

*Ces différentes présentations ne soni pas disponibles dans tous les pays