

**A CERUMEN****HYGIÈNE AURICULAIRE / EAR HYGIENE****(R)**

L'oreille est un organe complexe composé de trois parties distinctes (l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne) permettant l'audition. Le conduit auditif externe, reliant le pavillon au tympan, est tapissé par des glandes sébacées qui sécrètent du cérumen, une substance cireuse très grasse, de couleur jaune.

A quoi sert le cérumen ?

Le cérumen protège l'oreille des infections, de la poussière et des corps étrangers. Il permet la régulation des germes présents naturellement à la surface de la peau du conduit auditif externe. Enfin, il sert à lubrifier le tympan qui sinon deviendrait dur, rigide et n'assurerait plus de façon assez fine la transmission du son.

Pourquoi l'hygiène auriculaire est-elle importante ?

En principe, le cérumen s'évacue naturellement vers l'extérieur du conduit auditif externe avec les mouvements de mastication de la mâchoire.

Le dysfonctionnement de ce processus provoque l'accumulation de cérumen. Le bouchon ainsi formé altère le bon fonctionnement de l'oreille et se manifeste par une perte d'audition, des bourdonnements, des vertiges...

L'utilisation de solutions d'hygiène auriculaire non agressives contribue à maintenir le conduit auditif externe de l'oreille propre et à prévenir la formation de bouchons.

Qu'est ce que A-Cerumen ?

A-Cerumen est une solution douce d'hygiène auriculaire à base d'agents tensioactifs. A-Cerumen est conseillé pour l'enfant à partir de 30 mois et l'adulte :

- En usage régulier, pour faciliter l'élimination des résidus de cérumen et prévenir la formation des bouchons.
- Pour dissoudre les bouchons de cérumen.

POUR UNE UTILISATION CHEZ LE NOURRISSON, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN.

Présentation

Spray de 40 ml.

Composition

Sel d'alkylamido polypeptide en solution	35.56 g
Cocobétaine en solution	6.00 g
PEG - 120 Méthyl glucose dioléate	1.50 g
Excipients	q.s.p. 100 g

Posologie

- Pour l'hygiène régulière des oreilles : 2 fois par semaine,
- En présence de bouchons de cérumen : 3 à 4 jours de suite, matin et soir.

Mode d'administration

- Pencher la tête du côté opposé à l'oreille à traiter.
- Appliquer une pulvérisation dans l'oreille.
- Laisser en contact environ 1 minute.
- Pencher la tête pour laisser s'écouler le produit et les résidus de cérumen, puis rincer* et essuyer l'excédent.

Mises en garde

- Risque de sensibilisation à l'un des composants.
- Conserver le produit à une température inférieure à 30°C.
- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur le flacon.

Précautions d'emploi

- Ne pas introduire trop profondément l'embout du flacon dans le conduit auditif afin de ne pas l'irriter.
- Ne pas utiliser le produit en cas de perforation du tympan, d'otite et chez les porteurs d'aérateur transtympanique.
- En cas de douleur au niveau de l'oreille, consultez votre médecin.
- Éviter le contact avec les yeux.
- Ne pas avaler.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

* Rincer avec du sérum physiologique ou de l'eau claire.

Date de marquage CE: 2010

(E)

The e
extern
auditi
glands
colour

What

Cerum
the ba
canal.
and rig

Why i

Under
the ex
chewin
resulta
of hear
By usin
clean,

What i

A-Ceru
A-Ceru
adults:
• Used
build-
• It also

BEFO
ADVIC

Packag

Spray c

Compo

Solution
Solution
PEG 12
Excipie

Dosage

- For re
- If plug

Instru

- Tilt yo
- Apply
- Leave
- Tilt yo
- then ri

Warnin

- Risk o
- Store b
- Do not

Precaut

- Do not
- Do not
- sufferin
- If the e
- Avoid c
- Do not

KEEP O

* Rinse v

CE-mark