

Flamozil
Gel hydrocolloïde pour des plaies
Exempt de parabènes



Indications

Flamozil est un gel hydrocolloïde exempt de parabène indiqué pour les soins des plaies locales, sèches ou humides. Flamozil est un dispositif médical qui stimule indirectement la cicatrisation de la plaie en régulant le micro-environnement de la plaie.

A appliquer sur les lésions aiguës ou chroniques telles que:

- Brûlures superficielles
- Éraflures
- Plaies chirurgicales
- Escarres (décubitus)
- Ulcères ouverts de la jambe

Propriétés et composition

Flamozil est constitué d'un carbomère acide qui est stabilisé par la carnosine, un peptide basique présent naturellement dans la peau. Sur les plaies sèches, comme les éraflures et les plaies chirurgicales, la couverture avec ce carbomère produit un effet occlusif : elle empêche l'évaporation d'eau et diminue les pertes hydriques de l'épiderme. La carnosine tamponne les polymères acides et est en même temps un antioxydant. Sur les plaies humides suintantes, le carbomère absorbe le liquide de plaie excédentaire. Flamozil rafraîchit, adoucit le contact avec les emplâtres ou pansements, et n'adhère pas dans la plaie. Flamozil ne contient pas de parabène irritant comme conservateur, mais du citrate d'argent.

Composition : carbomère colloïdal acide, carnosine, eau, conservateur : citrate d'argent

Mode d'emploi

Plaies fermées :

- nettoyez et désinfectez l'endroit du traitement
- appliquez Flamozil sur la plaie sans la toucher avec l'aérosol
- si nécessaire, posez un pansement ou un emplâtre

Plaies ouvertes:

- nettoyez et désinfectez la plaie
- séchez-la prudemment
- appliquez une couche épaisse (0,5-0,75 cm) sur la plaie
- posez un pansement ou un emplâtre
- laissez le pansement en place de un à trois jours, jusqu'à ce que le gel ait fondu
- réduisez Flamozil au fur et à mesure qu'il se forme une croûte sur la plaie

Attention – Brûlures: d'abord de l'eau, puis les étapes suivantes.

Flamozil n'est pas la première mesure en cas de brûlures ! Refroidissez immédiatement la brûlure pendant une vingtaine de minutes sous de l'eau courante tiède. Ce traitement doit être effectué le plus rapidement possible, parce que l'effet positif se réduit et disparaît après 30 minutes. Afin d'éviter le risque d'hypothermie, il vaut mieux ne pas utiliser une eau trop froide, surtout lorsque la brûlure touche une surface importante. Ce n'est que par la suite, lorsque la gravité de la brûlure a été bien évaluée, qu'on peut appliquer Flamozil.

Précautions particulières

On ne connaît pas d'effets indésirables tels qu'irritation ou hypersensibilité. Flamozil ne convient pas pour être appliqué sur les yeux, les paupières ou les muqueuses.

Consultez toujours un médecin

- pour des plaies de grande taille, étendues ou très profondes
- pour de petites lésions fortement infectées
- en cas de guérison lente ou de risque de complication

Dans ces cas aussi, Flamozil est utile, mais il ne satisfait nullement comme seul traitement.

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption (voir emballage).

Usage externe.