

OBESIMED®

Dispositif médical CE 0086

Prévient l'excès extrême de poids et la surconsommation alimentaire
Aide à adopter des habitudes alimentaires équilibrées
Pour une perte de poids substantielle et le traitement de l'obésité

Conseil d'ordre général : Lisez la notice minutieusement avant d'utiliser Obesimed®, même si vous avez déjà utilisé ce dispositif médical antérieurement. Lors de l'ouverture d'un nouvel emballage, les informations qu'elle contient peuvent avoir été modifiées en fonction des connaissances et des données les plus récentes. Conservez cette notice, vous pouvez avoir besoin de la relire.

Application : Obesimed® est un dispositif médical pour le traitement du surpoids léger à extrême (obésité) chez l'adulte et l'enfant. L'utilisation d'Obesimed® prévient la surconsommation alimentaire, aide à adopter des habitudes alimentaires équilibrées et conduit à une perte substantielle de poids. Obesimed® absorbe de grandes quantités d'eau et forme une substance naturelle qui remplit l'estomac. Cela entraîne une sensation de satiété et contribue au rassasiement au cours du repas et de la période qui le suit. Il favorise la saturation de l'estomac et contribue par conséquent à la prévention d'un surpoids extrême et à la prise d'habitudes alimentaires différentes.

Dosage et utilisation : Obesimed® ne doit pas être utilisé pendant plus de 30 jours au cours d'une période de traitement.

Ingérez la gélule entière. Pendant l'amaigrissement et l'utilisation d'Obesimed®, vous devez compléter votre alimentation quotidienne avec une préparation de vitamines et de minéraux de A à Z contenant 100 % de l'apport nutritionnel recommandé.

Adultes : 3 fois par jour 2 gélules 1 heure avant le repas, à ingérer avec 2 verres d'eau.

Enfants à partir de 10 ans : 2 à 3 fois par jour 2 gélules 1 heure avant le repas, à ingérer avec 2 verres d'eau.

Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

Composition : Le produit est à base de composants végétaux. OMTEC 19®, Amylum Solani, Hypromellose (E464), Oleum Helianthus, Dioxyde de titane (E171).

Le produit convient aux végétariens.

Allergènes : Ce produit ne contient aucun allergène.

Utilisation au cours de la grossesse et/ou de l'allaitement : Il est déconseillé de maigrir au cours de la grossesse ou de l'allaitement, étant donné que des substances nocives provenant des tissus adipeux peuvent alors parvenir chez l'enfant. L'utilisation d'Obesimed® est par conséquent déconseillée.

Utilisation en combinaison avec d'autres médicaments : Obesimed® réduit le taux sanguin de glucose. L'utilisation en combinaison avec d'autres suppléments/médicaments

diététiques ayant un effet hypoglycémique similaire est par conséquent déconseillée. Les médicaments à prendre oralement doivent être pris 1 heure avant ou 4 heures après l'ingestion d'Obesimed®.

Avertissements :

- Obesimed® ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à un ou plusieurs de ses composants. Si vous doutez de pouvoir utiliser Obesimed® et/ou de pouvoir utiliser Obesimed® en combinaison avec un médicament, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.
- Attention ! Ne pas ouvrir la gélule avant de l'ingérer.
- Conserver hors de la portée des jeunes enfants.
- L'utilisation par des enfants doit avoir lieu sous la stricte surveillance d'un adulte.

Effets indésirables possibles : Obesimed® est bien supporté et ne provoque que peu d'effets indésirables. Des troubles gastriques et intestinaux modérés, tels que légère diarrhée, régurgitation et formation de gaz, peuvent cependant se produire lors de l'utilisation d'Obesimed®. Généralement, ces effets indésirables disparaissent après quelques jours. Consultez votre médecin si les troubles persistent plus de 3 jours.

Poids net total : 45 gélules 40 grammes, 135 gélules 121 grammes, 895 mg par gélule.

Mode de conservation : Conserver à température ambiante (15 à 25 °C), dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, dans l'emballage original.

Dispositif médical : La fabrication a lieu selon des exigences de qualité rigoureuses, conformément à la norme ISO 13485:2003. Obesimed® est un dispositif médical de classe IIa, conforme à la directive 93/42/CEE.

Ligne d'information Obesimed® : Pour toute question spécifique concernant ce dispositif médical, contactez la ligne d'information Obesimed® : ☎ 0800-73183. Ce numéro d'information spécial est disponible aux heures de bureau.

Date limite d'utilisation : L'utilisation d'Obesimed® après la date de péremption inscrite sur l'emballage après la mention « à consommer avant » est déconseillée.

Date de la dernière révision de la notice : Avril 2009 IFU OB 04-09

■ Fabricant : PK Benelux | Pharma Care BV,
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden NL