



ANTIBACTERIAL DRESSING

MEDIHONEY

FR

Miel Antibactérien Medihoney® est un miel antibactérien standardisé, principalement *Leptospermum* sp., sélectionné pour ses propriétés uniques de détersion des plaies et de barrière antibactérienne. Gel Antibactérien pour Plaies Medihoney® est une formule spéciale, un mélange de 80% de Miel Antibactérien Medihoney® avec des cires et huiles naturelles. Le résultat est un gel de haute viscosité simple à appliquer et facilement lavable lors des changements de pansement.

Gel Antibactérien pour Plaies Medihoney® est une préparation topique qui peut être utilisée aussi bien dans le cas de plaies chroniques qu'aiguës. Son efficacité a été démontrée cliniquement dans les indications suivantes:

- Apport d'un environnement humide, favorisant la guérison de la plaie
- Protection de la plaie par une barrière résistante aux pathogènes, y compris les souches résistantes aux antibiotiques
- Garantit une plaie plus propre
- Élimination rapide des mauvaises odeurs
- Réduction du risque d'infection microbienne

Gel Antibactérien pour Plaies Medihoney® constitue un pansement naturel non adhérent aux tissus, réduisant ainsi les traumatismes et la douleur lors du changement des pansements.

Indications

- Ulcères de jambes/pieds
- Plaies de pression
- Plaies infectées
- Plaies sphacélées
- Plaies nécrosées
- Plaies fétides
- Plaies opératoires
- Greffes de peau : zones de prélèvement et peau greffée
- Brûlures
- Plaies superficielles comme coupures, égratignures ou abrasions
- Brûlures superficielles
- Premiers soins en général

Les plaies graves, telles que plaies opératoires, plaies infectées, brûlures, ulcères de jambes/pieds, plaies de pression, plaies liées au diabète, sites de greffe donneur et récepteur, plaies nécrosées, sphacélées ou fétides, doivent être traitées sous la supervision d'un professionnel des soins de santé.

Mode d'Emploi

1. Enduisez les bords de la plaie avec une crème de protection
2. Gel Antibactérien pour Plaies Medihoney® peut être appliqué directement sur le fond de la plaie. Évitez un contact direct entre la plaie et l'embout du tube.
3. Assurez-vous que la couche de Gel Antibactérien pour Plaies Medihoney® recouvre complètement le fond de la plaie – sur une épaisseur d'environ 3 mm (1/4 de pouce). Augmentez la quantité s'il y a de la sérosité dans la plaie.
4. Un tampon ou une compresse stérile non adhésive adapté doit être appliqué pour recouvrir Gel Antibactérien pour Plaies Medihoney®.
5. La compresse doit être suffisamment absorbante pour absorber le liquide s'écoulant de la plaie (exsudat).
6. Gel Antibactérien pour Plaies Medihoney™ peut être laissé dans la plaie pour une durée allant jusqu'à 7 jours, en fonction de la quantité de sérosité présente. Le pansement doit être changé quand il est saturé de sérosité ou quand le pansement extérieur présente des fuites.
7. Lors du changement de pansement, les cires contenues dans Gel Antibactérien pour Plaies Medihoney® peuvent rester dans la plaie en formant une couche protectrice. Si on le souhaite, il est possible de les enlever par lavage à chaque changement de pansement.

Contre-indications

- Ne pas utiliser sur des individus ayant présenté une réaction allergique au miel.

Remarques

- Une petite quantité de miel peut s'écouler à l'ouverture du tube. Ceci est tout à fait normal et n'indique en aucun cas une détérioration du produit.
- La blessure peut sembler plus grande en taille et en profondeur à mesure que des tissus morts sont évacués. Cela devrait s'accompagner d'un meilleur aspect de la plaie.

Précautions

- Si le sujet traité éprouve toute autre sensation qu'un picotement de courte durée, enlevez le pansement et lavez la zone affectée.
- À utiliser avec précaution et surveillance étroite sur des plaies à forte exsudation.

Pour une utilisation sur un patient unique

La stérilité du produit est garantie uniquement si le tube est scellé. Ne pas utiliser si le tube est endommagé.

À utiliser dans les quatre mois suivant l'ouverture.