



MEDIHONEY™

FR

La crème de protection Medihoney® peut être appliquée sur les peaux intactes et sensibles pour fournir une protection contre les liquides corporels et l'humidité. Grâce à son action protectrice la crème permet d'empêcher l'apparition d'irritations cutanées lorsqu'elle est appliquée autour des plaies et sous les replis de la peau. La crème peut aussi être appliquée sous les pansements et les couches d'incontinence afin de réduire les risques d'irritation. La crème protectrice Medihoney™ aide au maintien des propriétés protectrices de la peau et à sa bonne hydratation.

Indications possibles

- Protège la peau sensible contre les irritations cutanées imputables à l'incontinence et peut être utilisée sous les couches d'incontinence
- Peut être utilisée sur les contours des plaies pour protéger la peau contre les irritations ou les lésions provoquées par les suppurations
- Protège la peau contre les frictions ou les égratignures
- Préviend la macération
- Préviend l'excoriation
- Aide au maintien du pH de la peau
- Protège la peau contre les dégâts dus aux lavages de main trop fréquents

Précautions

Avant d'utiliser la crème pour la première fois, testez-la sur une petite surface de la peau. Si la peau devient irritée, ne l'utilisez pas.

Mode d'emploi

Appliquez trois fois par jour ou comme requis, sur une peau propre et sèche. Réappliquez après un bain ou après chaque changement de pansement.

Peut être utilisée sur les enfants.