




تعليمات الاستخدام:  
أميغيتا قلم مملوء مسبقاً للاستخدام مرة واحدة (شوركليك)  
للاستخدام تحت الجلد

## دليل الأجزاء

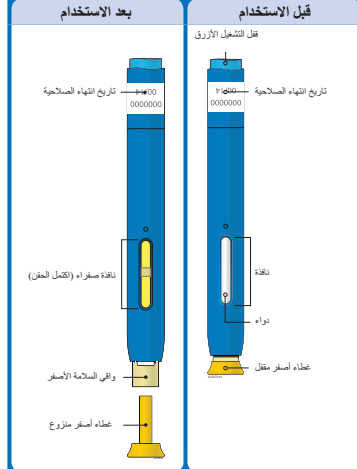

هام: الإبرة بالداخل.

## هام

قبل استخدام قلم أميغيتا المملوء مسبقاً، اقرأ هذه المعلومات المهمة:

- باستخدام قلم أميغيتا المملوء مسبقاً
- من المهم ألا تحلزل إعطاء الحقن إلا إذا تقيت أنت أو مقدم الرعاية الخاص بك تدريباً.
- لا تستخدم قلم أميغيتا المملوء مسبقاً إذا كان قد سقط على سطح صلب. قد يكون هناك كسر بأحد أجزاء قلم أميغيتا حتى ولو لم ترم. استعمل قلم جديد من أميغيتا المملوء مسبقاً.
- إن غطاء الإبرة من قلم أميغيتا المملوء مسبقاً مصنوع من المطاط الطبيعي اللين، الذي يحتوي على اللاتكس. أخطر مقدم الرعاية الصحية إذا كان لديك حساسية من اللاتكس.

## الخطوة الأولى: التحضير

### أ- انزع قلم أميغيتا المملوء مسبقاً من العبوة.

- احرص على رفع القلم المملوء مسبقاً إلى الأعلى مباشرة لإخراجه من العبوة.
- منع العودة الأصلية وكل ما بها من قلام مملوءة مسبقاً غير شملتة داخل التلاحة مجدداً.
- لمحقن أكثر راحة، اترك القلم المملوء مسبقاً في درجة حرارة الغرفة لمدة ١٥ إلى ٣٠ دقيقة قبل الحقن.
- لا تضع القلم المملوء مسبقاً مرة أخرى في التلاحة عند وصوله إلى درجة حرارة الغرفة.
- لا تحلزل نافذة القلم المملوء مسبقاً باستخدام مصدر حراري مثل الماء الساخن أو الميكروويف.
- لا تزع القلم المملوء مسبقاً.
- لا تزع الغطاء الأصفر من القلم المملوء مسبقاً حتى تصبح مستعداً للحقن.

## ب- افحص قلم أميغيتا المملوء مسبقاً.



تأكد من أن الدواء الموجود في النافذة صافٍ وديم اللون إلى أصفر باهت.

- لا تستخدم القلم المملوء مسبقاً إذا:
- كان الدواء باهتاً أو غير باهت اللون أو يحتوي على رقائق أو جسيمات.
- بدا أي جزء منه مشقوقاً أو مكسوراً.
- تم إسقاط القلم المملوء مسبقاً على سطح صلب.
- الغطاء الأصفر مقفلاً أو غير متصل بشكل آمن.
- القضي تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على الملصق.

في جميع الحالات، استخدم قلماً مملوء مسبقاً جديداً.

## ج- اجمع الأدوات التي تحتاجها للحقن.


اغسل يديك جيداً بالماء والصابون.  
على سطح عمل نظيف ومضاء جيداً، صنع قلماً مملوء مسبقاً جديداً.

سنتناول أيضاً إلى هذه العناصر الإضافية، حيث لا يتم تضمينها في العبوة:

- حاديل الكحول
- كرة القطن أو وسادة القطن
- جص (شريط لاصق طبي)
- وعاء التخلص من المواد الحادة



## د- حضر ونظف موقع الحقن.

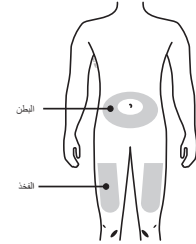

يمكنك استخدام:


- فخذك
- بطنك، ما عدا دائرة نصف قطرها ٥ سم (٢ بوصة) حول سرتك.

نظف الجلد في موقع الحقن باستخدام مسحة كحولية. ذع الجلد جف.

- لا تلمس هذه المنطقة مرة أخرى قبل الحقن.
- إذا كنت تريد استخدام نفس موقع الحقن، فحافظ من عدم الحقن في نفس البقعة التي استخدمتها في الحقن السابق.
- لا تحقن في المناطق التي يكون الجلد فيها طرياً أو بها كتل أو حمراء أو طفح.
- لا تحقن في المناطق ذات الندوب أو علامات التمدد.
- إذا كنت حساساً بالحساسية، يجب عليك تجنب الحقن مباشرة في مناطق يكون فيها الجلد مرتفعا أو مسطحا أو حمرا أو متقشرا، به باقع أو جروح.

## هـ- الخطوة الثانية: الاستعداد

اسحب الغطاء الأصفر على استقامته عندما تكون مستعداً للحقن.

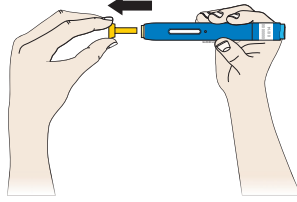


من الطبيعي أن ترى فقطة من السائل على قمة الإبرة أو على رافق السلامة الأصفر.

- لا تدور أو تثنى الغطاء الأصفر.
- لا تجد تعليمات القلم المملوء مسبقاً بعقلته الأصفر.
- لا تزع الغطاء الأصفر عن القلم المملوء مسبقاً حتى تكون مستعداً للحقن.

## و- اقصر موقع الحقن أو اجعله مشدوداً لتثبيت سطح الجلد.


### طريقة شد الجلد

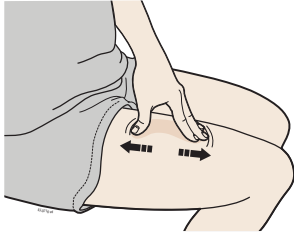

شد الجلد بحزم من خلال تحريكه في الاتجاهين معكسب باستخدام إبهامك وبقية أصابعك كي تخلق منطقة مشدودة عرضها نحو ٥ سم (٢ بوصة).

أو

### طريقة قرص الجلد

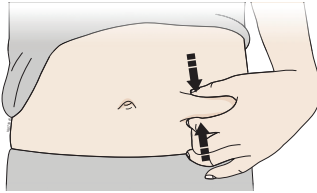


اقصر الجلد بحزم بين إبهامك وبقية أصابعك كي تخلق ثنية جلدية عرضها نحو ٥ سم (٢ بوصة).

هام: حافظ على الجلد في الوضع المشدود أو المقروص أثناء الحقن.

## ز- الخطوة الثالثة: الحقن

أبق الجلد في الوضع المشدود أو المقروص. بعد إزالة الغطاء الأصفر، ضع القلم المملوء مسبقاً على بشرتك بزاوية ٩٠ درجة.

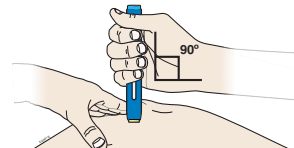


هام: لا تلمس زر التشميل الأزرق بعد.

## ح- ادفع القلم المملوء مسبقاً على الجلد إلى أسفل بحزم حتى يتوقف عن الحركة.




هام: يجب عليك أن تدفع للأسفل حتى النهاية ولكن لا تلمس زر البدء الأزرق حتى تصبح مستعداً للحقن.

## ط- استمر في الدفع على الجلد للأسفل. قد تستغرق حقنك حوالي ١٠ ثوان.

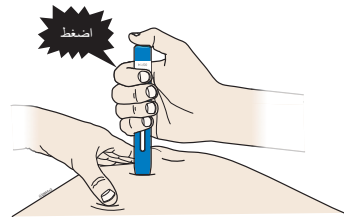

استمر في الدفع على الجلد للأسفل. قد تستغرق حقنك حوالي ١٠ ثوان.

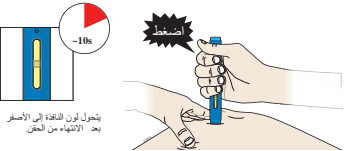


ملاحظة: بعد أن ترفع القلم المملوء مسبقاً عن جلدك، سيتم تعبئة الإبرة تلقائياً.

هام: عندما تقوم بإزالة القلم المملوء مسبقاً، إذا لم تتحول النافذة إلى اللون الأصفر، أو إذا بدأ أي دواء لا يزال يحقن، فهذا يعني أنك لم تلتفتي حركة كاملة. اتصل بطبيبك على الفور.

## ي- الخطوة الرابعة: الإهلاء

تخلص من القلم المملوء مسبقاً المستعمل ومن غطاء الإبرة الأصفر.

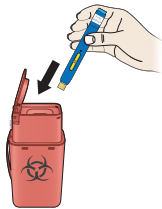

- ضع القلم المملوء مسبقاً المستعمل في حاوية التخلص من الأدوات الحادة فوراً بعد الاستخدام.
- لا تلمس من القلم المملوء مسبقاً في أي وقت من الأوقات.
- تحدث مع طبيبك أو المصنعي عن الطرق المناسبة للتخلص من المهملات. قد تكون هناك إرشادات محلية للتخلص من المهملات.
- لا تجد استعمال القلم المملوء مسبقاً.
- لا تجد تدوير القلم المملوء مسبقاً أو وعاء التخلص من الأدوات الحادة أو ترجمها مع الفضلات المنزلية.

هام: يجب دائما إلقاء وعاء التخلص من الأدوات الحادة بعيداً عن مرأى ومقتول الأطفال.

## ن- افحص موقع الحقن.

إذا كان هناك دواء، فاحفظ بقرة طفلية أو وسادة قطنية أو قطعة قماش على موقع الحقن. لا تمسك موقع الحقن طبق الجسم (الشريط الطبي اللاصق) إذا لزم الأمر.